

Sydäniskurin käyttö




Jos potilas ei herää, **SOITA HÄTÄNUMEROON 112.**


Aloita välittömästi painelupuhalluselvitys ja pyydä muita tuomaan defibrillaattori.




1. Avaa defibrillaattorin kansi ja kytke virta.

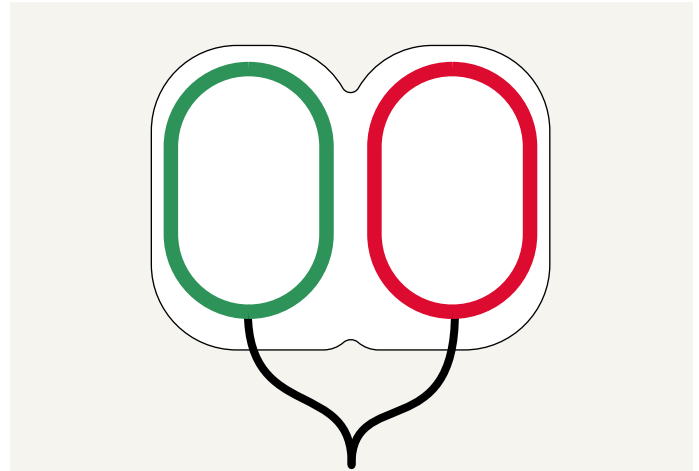


2. Ota elektrodit esiin.

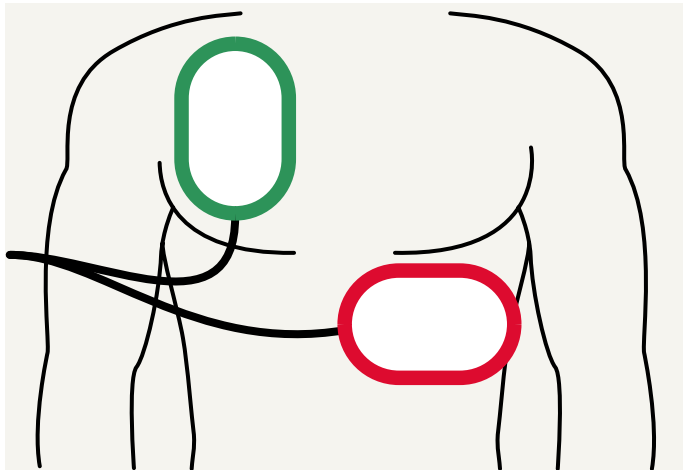

3. Kiinnitä elektrodit potilaan rintakehälle. Potilaaseen EI SAA KOSKEA sydämen rytmin analysoinnin aikana!

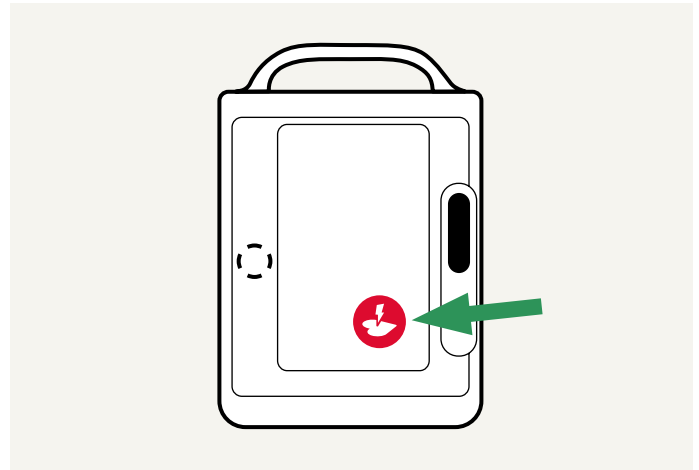

4. Paina iskupainiketta, jos kone niin kehottaa. PYSY IRTI POTILAASTA!

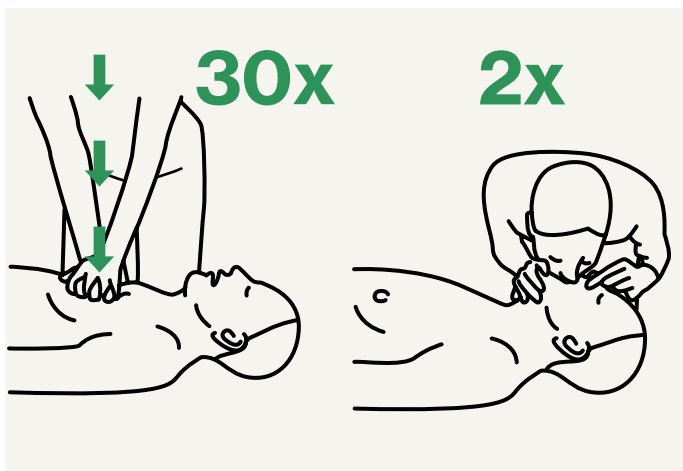

5. Jatka painelupuhalluselvitystä välittömästi iskun antamisen jälkeen. Seuraa jatkossa koneen antamia ohjeita.

**Voit lopettaa elvytyksen,
kun vastuu siirtyy
ammattihenkilölle,
potilaan hengitys palautuu tai
omat voimasi loppuvat.**